



EMODIAL

Via Finati, 4/A - Ferrara (ITALY)
Tel. (+39) 0532 978198 - Fax (+39) 0532 978414
www.emodial.it - info@emodial.it



Vertrieb durch:

USmed
Medizinprodukte

Bunte Berna 31 | 34123 Kassel
Fon +49 (0)561.7668635 | Fax +49 (0)561.7668636
www.usmed-online.de | info@usmed-online.de

REV. AUGUST 2016 EXIT-POCKET-WP - ref.D0013



EMODIAL

EXIT-POCKET-WP[®]

Wasserdichter Beutel
für den Katheterschutz



EXIT-POCKET-WP®

Beschreibung

Wasserdichter Beutel für den Katheterschutz. Die Öffnung ist komplett mit einem Klebepflaster umgeben, um den Beutel auf der Haut zu fixieren. Auch mit Öffnungs-/Schließsystem auf der Unterseite verfügbar.

Indikation

Sicherung der Katheterenden während des Duschens und der Patienten-Hygiene. Geeignet für Duschen und Baden (Tauchen). Das geschlossene Modell wird empfohlen, wenn ein langer Kontakt mit Wasser erforderlich ist. Modelle, die mit dem Öffnungs-/Schließsystem an der Unterseite ausgestattet sind ermöglichen es die innenliegenden Katheterenden und/ oder den Verband neu zu positionieren.

Zweck

Entwickelt, um den Katheter-Exit vor Kontakt mit Wasser zu schützen. Der Beutel ist bei guter Positionierung komplett wasserdicht und schützt damit den Katheter-Exit vor Wasser, um mikrobielle Kontaminationen zu vermeiden.

Vorteile

- Schnelles, einfaches Anbringen.
- Bequeme Passform.
- Steigert die Lebensqualität katheterisierter Patienten.
- Einfache und schnelle Entfernung.



Patentiert

Bestelldaten Daten und technische Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

CODE	PZN	Indikation	MODELL	VE
S2005H/WP	12535657	Peritoneal	Geschlossen - Bad u. Dusche	1x50 St.
S2005D/WP	12535663	Peritoneal	Öffnungs-/Schließsystem - Dusche	
S2011H/WP	12535686	ZVK-Katheter	Geschlossen - Bad u. Dusche	
S2011D/WP	12535692	ZVK-Katheter	Öffnungs-/Schließsystem - Dusche	

Wasserdichter Beutel für den Katheterschutz

Gebrauchsanweisung

- 1 Abdecken der Katheterenden mit dem Beutel.
- 2 Entfernung der Schutzfolie von der Klebefläche.
- 3 Platzieren Sie den unteren Teil der Öffnung in Übereinstimmung mit der Unterseite des Katheter-Exit. Komplettieren Sie dann die Verbandsbefestigung von unten nach oben. Dabei unbedingt Falten und Lufteinschlüsse vermeiden.
- 4 Während des Duschens oder Badens darauf achten, dass nicht im Bereich der Klebeflächen geschrubbt wird.
- 5 Lösen Sie sanft einen schmalen Streifen der Klebefläche am unteren Teil des Beutels. Ziehen Sie dann in kleinen Schritten von unten nach oben die gesamte Schutzfolie ab.



Klassifikation: Klasse I unsterile Medizinprodukte (EU)
Biokompatibilität: Übereinstimmung mit UNI EN ISO 10993 Standards
Haltbarkeit: 3 Jahre
Single-use

